

Měření krevního tlaku přes mobilní aplikaci DIANI BP

Pro automatizované měření krevního tlaku pomocí mobilní aplikace Diani BP je třeba nejprve nainstalovat tuto aplikaci na Váš chytrý telefon a propojit si s ním také tlakoměr FORA P30 Plus.

1) Propojení tlakoměru FORA P30 Plus s mobilním telefonem

Před samotným párováním telefonu s tlakoměrem se ujistěte, že máte na telefonu zapnuté Bluetooth! Následně postupujte dle pokynů níže:

- a) Pro propojení tlakoměru s telefonem je nutné nejprve na tlakoměru nastavit aktuální datum a čas. Pro nastavení data a času dlouze podržte pravé tlačítko „S“, dokud se nezobrazí na displeji hláška „PCL“.
- b) Následně tlačítko pusťte, na tlakoměru by měla následně blikat modrá dioda.
- c) V telefonu v nastavení Bluetooth pak zvolte vyhledávání dostupných zařízení a klikněte na položku s názvem „FORA P30“, pokud se v seznamu zobrazí.
- d) Zařízení by se Vám mělo zobrazit v seznamu spárovaných zařízení.

2) Instalace aplikace Diani BP


Pro instalaci si vyhledejte aplikaci přes obchod Google Play (přístup k aplikaci mají pouze registrovaní uživatelé. Pokud nemůžete aplikaci nalézt, kontaktujte technickou podporu na fiala.dom@gmail.com).

Po nainstalování aplikace ji otevřete na telefonu. Zobrazí se Vám okno pro přihlášení do aplikace. Přihlašovací údaje jsou stejné jako pro přístup na web Diani.



The screenshot shows the 'Diani Sign In' screen of a mobile application. At the top, there is a blue header with the text 'Diani Sign In'. Below the header, there are three input fields: 'Uživatelské jméno' (Username), 'Heslo' (Password), and 'Kód serveru' (Server Code). Each field has a horizontal line indicating the input area. Below these fields is a grey button with the text 'PŘIHLÁSIT' (Login). The status bar at the top of the phone shows various icons including Bluetooth, Wi-Fi, signal strength, battery level at 80%, and the time 12:45.

Po přihlášení se Vám na obrazovce zobrazí údaje o Vašem účtu. Pokud jsou údaje v pořádku, klikněte na potvrzovací tlačítko v pravém dolním rohu.

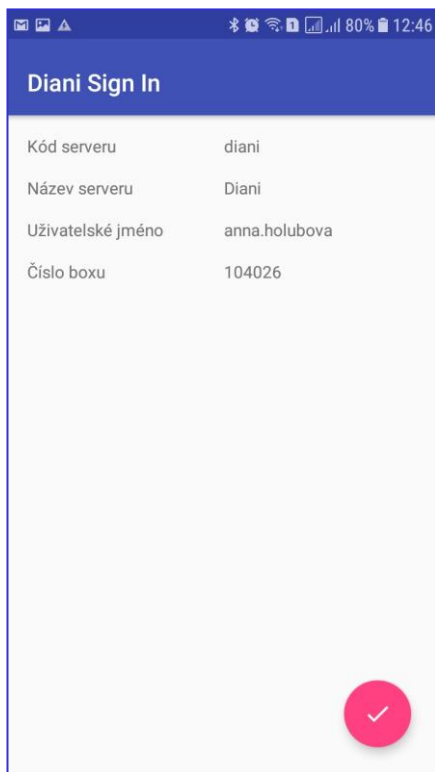

Následně se dostanete na úvodní obrazovku aplikace Diani, zatím bez naměřených hodnot.



Pokud máte již propojený tlakoměr FORA P30 Plus na Vašem telefonu, měl by Vám přenos naměřených hodnot do aplikace již fungovat. Naměřené hodnoty se zobrazují v seznamu dle času změření.

Diani BP			
pondělí 30. července 2018			
Sys: 110	Dia: 74	Tep: 79	10:23
Sys: 121	Dia: 82	Tep: 84	09:18
pátek 27. července 2018			
Sys: 126	Dia: 83	Tep: 84	13:07
Sys: 111	Dia: 72	Tep: 79	10:31
Sys: 122	Dia: 85	Tep: 90	08:11
čtvrtek 26. července 2018			
Sys: 115	Dia: 76	Tep: 85	14:52
Sys: 121	Dia: 75	Tep: 89	07:45
středa 25. července 2018			
Sys: 163	Dia: 111	Tep: 84	13:44
Sys: 113	Dia: 71	Tep: 80	10:23
Sys: 114	Dia: 75	Tep: 77	10:08
Sys: 117	Dia: 76	Tep: 89	07:53

V případě problémů kontaktujte technickou podporu na adrese: fiala.dom@gmail.com