Diani MiBand Soma - Návod k použití

Instalace

- 1) Před instalací si prosím zkontrolujte ve svém telefonu, že máte povolenou instalaci aplikací z neznámých zdrojů:
 - a. položka by měla být dohledatelná v sekci nastavení -> zabezpečení



- 2) Stahněte si instalační soubor aplikace Diani PA do chytrého telefonu a otevřete jej pomocí správce souborů.
- 3) při požadavku ke stažení klikněte na Instalovat



4) Po nainstalování aplikaci otevřete

🖬 😌 🖬 🕨	ž	≱ 🎯 🛟 🚛 57% 🖻 7:53	
DM D	viani MiBand		
√ Apl	ikace je nainsta	lována.	
		\frown	
HO	гоvо	OTEVŘÍT	
			•

5) Aplikace Vás vyzve k přihlášení

፼፨@		***	ul 74% 🖻 13:45		
Diani PA	- Přihláše	ní			
Uživatelské jn	néno				
Heslo	uluby				Due wähltigen (men Cl
Kód serveru					vložte kód "6809".
6809					přihlášení na DIANI
	PŘIHL	_ÁSIT			ponecitte pole praz
1	2	3	×		
4	5	6	Hot.		
7	8	9			
	0		*		

6) Po přihlášení se zobrazí informace o Vašem účtu – pokud souhlasí, potvrďte potvrzovacím tlačítkem vpravo dole

⊇¢©	≵ ¥ হিনে। 74% 🖬 13:45					
Diani PA - Přihlášení						
Kód serveru	Sitest					
Název serveru	Sitest					
Uživatelské jméno	studie.kladruby					
Číslo boxu	110037					

 Zadejte Vaše osobní údaje, můžete rovněž potvrdit snímání tepove frekvence a zvolit interval jejího měření. Dále lze nastavit interval synchronizace dat s telefonem.



8) Povolte přístup k poloze zařízení



9) Vyhledejte v seznamu Vaše Xiaomi zařízení (pod názvem MI Band 2) a dbejte na to, aby v okolí telefonu bylo pouze Vaše zařízení tohoto druhu pro spárování správného náramku. Klikněte na příslušný řádek s Vaším zařízením.

	ارار الله 🕄 🛠 🕷 🕄 الله 🕄	
Zařízení	STOP	
MI Band 2 CE:EF:D0:B2:AA:3B		
MI Band 2 F4:B5:AC:94:F6:F0		

- 10) Vyčkejte na vibraci náramku náramek by při prvním připojování měl zavibrovat a zobrazit na displeji kolečko pro potvrzení klikněte prstem na vyznačené kolečko na displeji
- 11) Náramek by měl opět zavibrovat jako signál spojení s telefonem
- 12) Zastavte využití optimalizaci baterie volbu "ANO"



13) Po spárování náramku s telefonem bude aplikace přesměrována na hlavní stránku s indikací připojování. Úspěšné připojení značí nápis "Připojeno" v kolonce *Stav připojení*

	🖻 🖻 🖿	∦ 👫 🖘⊪ 26% 🖻 14:15	
	Diani PA	÷	
	Název zařízení	MI Band 2	
	Adresa zařízení	CE:EF:D0:B2:AA:3B	
	Stav baterie	43%	
<	Stav připojení	Fetching data	
	Synchronizace trackeru	2018-08-16T14:13:20.988+02:0 0	
	Synchronizace serveru	2018-08-16T14:13:22.675+02:0 0	
		SYNC	
	2018-08-16	3982 kroků	
	2018-08-15	8252 kroků	
	2018-08-14	5851 kroků	
	2018-08-13	6224 kroků	
	2018-08-12	15177 kroků	
	2018-08-11	15739 kroků	
	2018-08-10	7999 kroků	

14) Poté by se měla data z náramku automaticky stáhnout a přenést na server. Pro manuální stažení lze kliknout na ikonu "**SYNC**"

- 1) Náramek nepřenáší data a v aplikaci indikuje stav "Odpojeno"
 - a. na hlavní stránce klikněte na tlačítko "SYNC"
- 2) Aplikace hlásí stav "Připojeno", ale data z náramku se nesesynchronizovala s aplikací
 - a. ujistěte se, že máte zapnuté Bluetooth připojení a náramek je spárovaný s telefonem
 - b. pokud se stav nezmění, ujistěte se, že je náramek dostatečně nabitý, případně jej nabijte
- 3) Aplikace stáhla data z náramku do aplikace, ale nepřenesla se na server
 - a. ujistěte se, že máte připojení k internetu s dostatečným signálem